




Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler. Efter adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne ud fra hvad de er lavet af, og genbruge dem individuelt. Kontakt venligst dit lokale genbrugssted for vejledning, hvis det er nødvendigt.

[www.danrehab.dk](http://www.danrehab.dk)

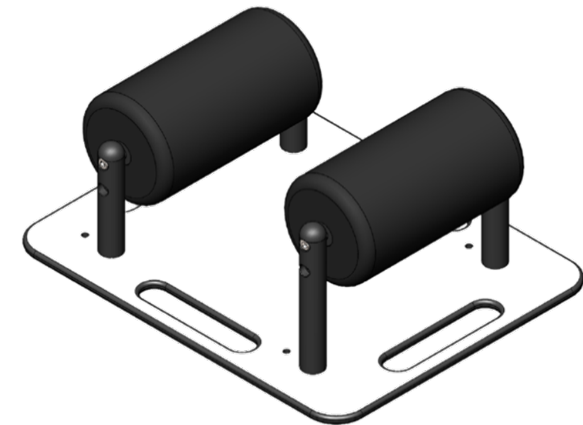

## Brugermanual

# CompressionAid®

BRUGERMANUAL – CompressionAid® – DK VERSION 3

## Vejledning



**Foto 1:**  
Placer en hånd i knæhasen og en omkring foden.



**Foto 2:**  
Benet bøjes ca. 90 gr. ved let glidende bevægelse af foden.




**Foto 3:**  
Rullepladen føres ind under benet.



**Foto 6:**  
Strømpen rulles stille og roligt op ad.



**Foto 7:**  
Strømpen føres let hen over rullerne, bemærk kan gøres uden at løfte borgerens ben.

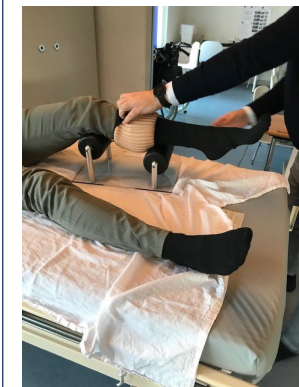

**Foto 8:**  
Doff N' Donner rulles af borgerens ben, uden at løfte benet.



**Foto 4:**  
Den højeste rulle skal være placeret under knæhasen.



**Foto 5:**  
Strømpen påført Doft N' Donner placeres ved borgerens fod.



**Foto 9:**  
Benet bøjes igen op til ca. 90 gr.



**Foto 10:**  
Rullepladen trækkes forsigtigt ud