


Demontering av eMensa benk på stående palle

Benkene leveres til bakkeplan utenfor varemottak/bygg som standard fra Gymo.
Man trenger drill eller skrujern til å ta ut skruer fra siden av benken

Steg 1:

Fjern plastikk rundt benk, **NB! Kniv må ikke brukes, kan skade stoffet.**

Skru ut alle skruene fra begge sider av pallen, oppe og nede.

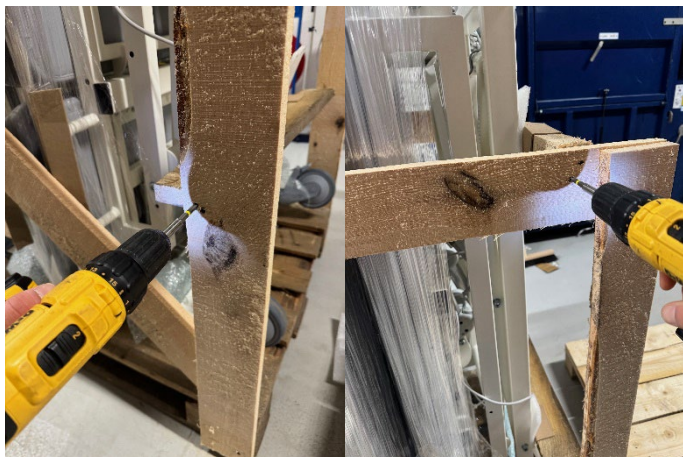

Steg 2

Kutt opp 2 stropper helt nede på benken.



Steg 3

Senk benken rolig ned på hjulene på bakken.

Pass på hodedelen ved nedløfting.

Pass på at alle skruer er skrudd ut av pallebenken

NB! Krever 2 stk for å løfte den ned.

Pass på at alle skruer er helt ute før man løfter ned



Steg 4.

Ta av bremsene og rull den til ønsket lokasjon.